



การเบิกอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ

(THIGT SLEEVE)



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.หน่วยงานสร้างใบเบิกในระบบ HO เพื่อทำการขอเบิกได้ที่ คลังงานบริการพยาบาล ในเวลา
ราชการ

(เบิกแบบ Request for Transfer)

2.คลังงานบริการพยาบาลจะทำการตัดจ่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ LOGISTIC นำส่งวัสดุยัง
หน่วยงาน(หน่วยงานไม่ต้องพิมพ์ใบเบิกนำส่ง)

3.หน่วยงาน ทำการ Accepted ในระบบ HO ทุกครั้งเมื่อได้รับวัสดุ

รายละเอียดวัสดุ

Sleeve Type	Width	Girth	Length
 [THIGH SLEEVE]	S < 60cm (24")	S < 54cm (21")	S < 55cm (22")
	M < 75m (30")	M < 69m (27")	M < 64m (25")
	L < 93cm (37")	L < 87cm (34")	L < 67cm (26")
	XL < 113cm (44")	XL < 107cm (42")	XL < 67cm (26")
	< 80cm (31")	< 71cm (28")	< 63cm (25")

Width คือ ความกว้างของขา

Girth คือ ความกว้างของรอบขา

Length คือ ความ

ยาว

ให้ทำการวัดขาผู้ป่วยก่อนทำการเบิก THIGH SLEEVE



การเบิกอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ

(THIGT SLEEVE)

รหัสรายการวัสดุ

ITEM CODE	ITEM NAME
42142108TSLEEVES	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size L
42142108TSLEEVE M	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size M
42142108TSLEEVEL	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size L
42142108TS00003	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่หลอดเลือดดำ ขนาด XL



การทำความสะดวกอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ

(THIGT SLEEVE)

ข้อบ่งชี้

การนำกลับมาใช้ซ้ำ สามารถทำได้เมื่อ

1. ในผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อดื้อยา ไม่เป็นโรคติดต่อ
2. ไม่มีคราบเลือด คราบสกปรกจำนวนมาก

หากใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา เป็นโรคติดต่อ และอุปกรณ์มีคราบเลือด คราบสกปรกจำนวนมาก ให้ทิ้งขยะติดเชื้อทันที ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. หลังการใช้งาน ให้ปลดอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำออกจากเครื่องเพื่อนำมาทำความสะอาด
2. เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างจาน / ผงซักฟอก เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกตามด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด และผ้าแห้ง (ห้ามนำไปซัก)
3. ใช้ 70% Alcohol เช็ดอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำจนทั่ว แล้วนำไปตากแดด
4. ทำการพับจัดเก็บในถุงสะอาดระบบปิด เพื่อสำรองใช้งานกับผู้ป่วยรายต่อไป